

Logiciel de gestion d'Hypertension Management Software (HMS CS) 6.X avec le Mobil-O-Graph



Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi !

1 Connection du Mobil-O-Graph® à l'HMS CS (appairage)

Tout d'abord, le logiciel de gestion de l'hypertension (HMS CS) doit être installé sur votre ordinateur. Le programme d'installation démarre automatiquement après avoir inséré le CD dans le lecteur de CD-ROM. Suivez les instructions à l'écran.
Pour une mesure de la tension artérielle sur 24 heures avec le Mobil-O-Graph®, veuillez utiliser des piles neuves/chargées ou des batteries rechargeables chargées. Le Mobil-O-Graph ne doit être ajouté à la liste des interfaces qu'une seule fois.

Via Bluetooth® :


Ordinateur :

- Démarrez le HMS CS via l'icône **HMS CS IEM** sur votre bureau.
- Cliquez sur l'icône **Options** *** → **Interfaces Bluetooth** → puis sur le bouton **Ajouter le moniteur**
- Une fenêtre apparaît avec la prochaine instruction de travail :
« Allumez l'appareil et changez le mode de jumelage ».
- Cliquez ensuite sur « **OK** »




Mobil-O-Graph® :

- Allumez le Mobil-O-Graph® à l'aide de la touche **Marche/Arrêt**.
- Maintenez la touche **Démarrer** enfoncée et appuyez sur la touche **jour/nuit** pour faire clignoter **bt** à l'écran
- Appuyez sur la touche **Démarrer** jusqu'à ce que les lettres **PAir** clignotent sur l'écran.
- Confirmez cela en appuyant sur la touche **événement**
« Les lettres **PAir** sont visibles de façon permanente et un signal sonore retentit. »

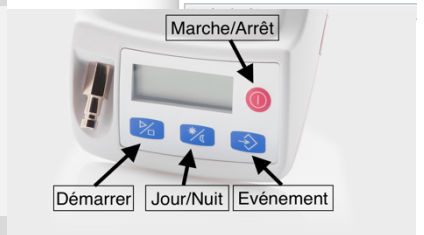

Ordinateur :


- Confirmez avec **OK**. Tous les périphériques Bluetooth® sont recherchés et affichés à portée de main. Le numéro de série® (SN) qui se trouve indiqué sur le dos du Mobil-O-Graph.
- Cliquez sur le numéro de série correspondant, puis cliquez **Pairing OK** →.
- Le Mobil-O-Graph® est ajouté à l'interface et connecté.

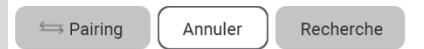

Par câble :


Mobil-O-Graph®:

- Éteindre le Mobil-O-Graph® à l'aide de la touche **Marche/Arrêt**.
- Connectez l'appareil à l'ordinateur avec le câble en respectant l'alignement des points rouges sur le câble et le moniteur de pression.
- Allumez le moniteur de pression artérielle à l'aide de la touche **entrée/sortie**.
- Les lettres **CO** apparaissent sur l'écran du Mobil-O-Graph®.

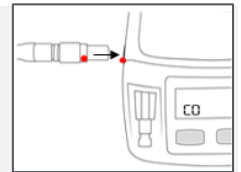

Ordinateur :

- Démarrez le HMS CS via l'icône **HMS CS IEM** sur votre bureau.
- Cliquez sur l'icône **Options** *** → **Interfaces Série/IR/USB**, → puis sur le bouton **Ajouter périphérique**. La fenêtre **connexion de l'appareil** apparaît.
- Cliquez sur **Rechercher**. L'appareil trouvé s'affiche dans le champ de fonctionnement **Type**, l'interface correspondante dans le champ de fonctionnement **Interface**.
(NOTA: Si aucun périphérique n'est trouvé, une indication s'affiche)
- Cliquez sur le bouton **Sauvegarder**.
- Le Mobil-O-Graph® est ajouté et connecté à l'interface.

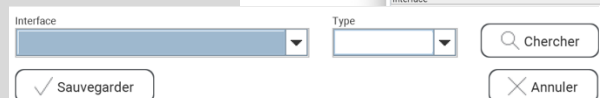

2 Préparation du moniteur de pression artérielle pour la mesure 24h


Ordinateur :

- Cliquez sur l'icône Liste des patients, sélectionnez le patient ou intégré un nouveau patient.

Via Bluetooth®:


Mobil-O-Graph® :

- Retirez le brassard du patient et détachez le raccord de tuyau de l'appareil de mesure.
- Maintenez la touche de démarrage enfoncée et appuyez sur la touche **jour/nuit**.
- Sur l'écran apparaissent les lettres **bt** clignotant.
- Appuyez sur la touche événement afin que les lettres **bt** reste fixe de façon permanente et un signal sonore retentit.

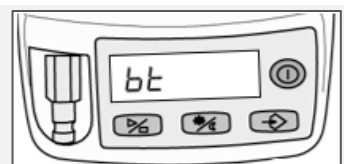


Ordinateur :

- Il apparaît la fenêtre **Action de moniteur**.
- Cliquez sur le bouton **Préparer le moniteur**.

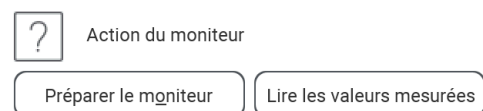


Via le câble :

Mobil-O-Graph®:

- Éteindre l'appareil avant de le connecter à l'ordinateur avec le câble.
- Allumez le moniteur de pression artérielle à l'aide de la touche **Marche/Arrêt**. 
- Les lettres **CO** apparaissent sur l'écran.

Ordinateur :

- Dans le HMS CS, cliquez sur l'icône **Communication appareil** 
- Cliquez sur **Préparer le moniteur**.







3 Préparation de l'appareil de mesure


Ordinateur :

- Il apparaît une nouvelle fenêtre **Préparer le moniteur**
- Modifiez les paramètres du protocole selon vos souhaits.
- Vous pouvez également activer ou mettre à jour les configurations de l'appareils.
- Cliquez sur le bouton **Sauvegarder**.



Mobil-O-Graph®:

- Si vous utilisez l'interface câblée, détachez le câble du Mobil-O-Graph®.
- Placez le brassard avec le raccord de tuyau vers le haut.
- Placez le Mobil-O-Graph® dans l'étui de protection avec l'écran visible et fermez-le.
- Connectez correctement le brassard et le Mobil-O-Graph® via le raccord de brassard.
- Allumez le moniteur de pression artérielle à l'aide de la touche **Marche/Arrêt**. 
- Effectuez une mesure manuelle.
- Pour ce faire, appuyez sur la touche **Démarrer**  et attendez complètement la fin de cette première mesure. Après la réussite de celle-ci, le patient peut effectuer la mesure à long terme de façon autonome. (NOTA : une mesure réussie est la condition préalable à l'activation du protocole)
- Expliquez l'utilisation de la touche **événement**  et de la touche **jour/nuit**. 

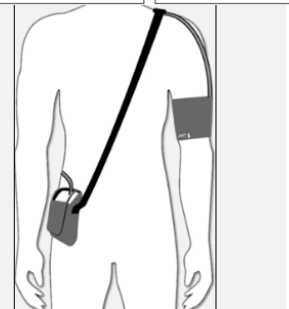

4 Transmission et stockage des résultats de la mesure à long terme

Ordinateur :

- Redémarrez le HMS CS si vous les avez fermés. 
- Cliquez sur la liste des patients  et sélectionnez le patient souhaité ou en créer un nouveau.

Via Bluetooth®

Mobil-O-Graph®:

- Enlevez l'appareil de mesure au patient.
- Connectez le Mobil-O-Graph® à l'ordinateur conformément au chapitre 2 section **Via Bluetooth®**

Ordinateur :

- Il apparaît la fenêtre **Action du moniteur**.
- Cliquez sur le bouton **Lire le moniteur**.
- Suivez ensuite les instructions du logiciel.




Par câble:

Mobil-O-Graph®:

- Enlevez l'appareil de mesure au patient.
- Connectez le Mobil-O-Graph® à l'ordinateur conformément au chapitre 2 section **Par câble**.


Ordinateur :

- Dans le HMS CS, cliquez sur l'icône communication  de l'appareil
- **Lire les valeurs mesurées**.
- Suivez ensuite les instructions du logiciel.



5 Résultats

Ordinateur :

- Cliquez sur l'icône Liste des patients 
- Sélectionnez le patient désiré et **Ouvrir patient**.
- Dans la fenêtre de travail, cliquez sur l'onglet **Pression artérielle PWA**.
- Cliquez sur une mesure.
- Vous pouvez choisir entre différentes formes de représentation des résultats



6 Nettoyage

Pour le nettoyage ou le lavage des brassards, veuillez impérativement séparer la gaine de la pochette de l'intérieur. La bulle de manchons, y compris le tuyau, ne doit pas entrer en contact avec l'eau. Si l'eau pénètre dans l'enregistreur, il en résulte de graves dommages.