

INCIDIN LIQUID



Spray Désinfectant

DISINFECTION DE SURFACE
À BASE D'ALCOOL PRÊTE À L'EMPLOI
Il offre une grande fiabilité à l'utilisateur grâce
à son large spectre d'efficacité
Dispositif médical classe IIa & Biocide TP2

Application

Solution de désinfection des
surfaces à action rapide et prête
à l'emploi pour les dispositifs
médicaux

Propriétés Microbiologiques

Bactéricide	Selon EN 13727 (30 sec.) / EN 16615 (1 min) en 1 min**
Levuricide	Selon EN 13624 (30 sec.) / EN 16615 (1 min) en 1 min**
Tuberculocide	Selon EN 14348 / EN 16615 (méthode) en 1 min**
Actif sur les virus enveloppés	Selon EN 14476 en 30 sec**
Virucide à spectre limité	Selon EN 14476 (Adénovirus - 1min, Norovirus - 30 sec.) en 1 min*

Mode d'emploi

Utiliser le produit non dilué sur une lingette non
tissée.

Essuyer la surface résistante à l'alcool
et le produit, ou vaporiser la surface à une
distance d'environ 30cm (max 40ml/m²) et
laisser sécher.

Veiller à ce que toute la surface
soit complètement mouillée.

Avantages

Spectre d'efficacité en temps de contact courts,
idéal même pour les zones de soins intensifs et
autres zones à risque

Prêt à l'emploi et offrant une compatibilité
éprouvée avec les matériaux sur les surfaces
résistantes à l'alcool

Temps de contact court
Formule sans colorant ni parfum
Excellente compatibilité avec les surfaces
résistantes à l'alcool

Références

Incidin™ Liquid

12 flacons des 1L
(+1 pulvérisateur) **2940E314I**

2 Bidons de
5L **2940E034H**

Pulvérisateur **511007**

Composition 100 g contiennent les éléments suivants : 35g de 2-Propanol, 25g de 1-Propanol