

# Incidin™ OxyWipe NG



## Solution synergique de peroxyde d'hydrogène pour le nettoyage et la désinfection

### Lingette nettoyante et désinfectante prête à l'emploi

La formule avancée d'Incidin™ Oxywipe NG offre les avantages de la solution brevetée\* à base de peroxyde d'hydrogène combinée à l'effet synergique du phénoxyéthanol, ce qui se traduit par :

- Formule efficace sans parfum ni colorant
- Nettoyage et désinfection en une seule étape, laissant la surface visiblement propre
- L'efficacité est confirmée pour le liquide issu de la lingette
- Formulation à base d'ingrédients biodégradables

Grâce à ses caractéristiques, Incidin OxyWipe NG convient à une large gamme de matériaux utilisés dans les établissements de santé et constituent des produits parfaitement adaptés aux soins intensifs et autres zones à haut risque.

Ils peuvent ainsi être utilisés conformément à vos protocoles, offrant les résultats de désinfection et le niveau de conformité requis pour désinfecter efficacement et limiter la propagation des agents pathogènes.



\*Brevet européen EP1987121

# Incidin™ OxyWipe NG

Lingette nettoyante et désinfectante prête à l'emploi

## Efficace

- Efficacité à large spectre et temps de contact courts combinés aux propriétés d'un nettoyant doux

## Sûre

- Large compatibilité avec les matériaux, y compris les surfaces sensibles à l'alcool comme l'ABS, et le plexiglas

## Pratique

- Nettoie et désinfecte
- Prêt à l'emploi

## Caracteristiques

- Lingettes en polypropylène de haute qualité (50 g/m<sup>2</sup>) pour une application efficace

## Proprietes microbiologiques

Efficacite	Temps de contact
Bactéricide selon EN 13727 (1 min*) / EN 16615 (1 min*)	1 min*
Levuricide selon EN 13624 (2 min*) / EN 16615 (1 min*)	2 min*
Fongicide selon EN 13624 (15 min*) / EN 16615 (méthode) (5 min*)	15 min*
Tuberculocide / mycobactéricide selon EN 14348 (30 min*) / EN 16615 (méthode) (15 min*)	30 min*
Efficace contre les virus enveloppés selon EN 14476	5 min*
Virucide à spectre limité selon EN 14476 (Adenovirus 30 min**, Norovirus 30 min**)	30 min**
Efficace contre Polyomavirus SV 40 selon EN 14476	5 min*
Efficace contre Rotavirus selon EN 14476	5 min*

\* Condition de saleté \*\* Condition de propreté

## Informations

Produit	Conditionnement	Reference
Incidin™ OxyWipe NG	6 x 100 lingettes (20 x 20 cm)	ECL3114110
Incidin™ OxyWipe NG XL	6 x 50 lingettes (25 x 37 cm)	ECL3114190
Distributeur mural pour Incidin™ OxyWipe NG (acier inoxydable)	6 x 1	ECL10033677
Support mural pour les paquets de lingettes (polypropylène durable)	12 x 1	ECL10057686



## Indications

### Dispositif médical :

Lingette de désinfection et de nettoyage de surface prête à l'emploi pour les dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables conformément à la directive 93/42/EEC.

### Biocide :

Lingette de désinfection et de nettoyage prête à l'emploi pour les surfaces générales.

## Mode d'emploi

Lingette prête à l'emploi. Prendre une seule lingette. Essuyer soigneusement la surface, en assurant le contact avec toute la surface et laisser sécher. Respecter le temps de contact indiqué et les conditions pour l'activité antimicrobienne recherchée. Fermer le couvercle après utilisation. Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux agents oxydants tels que le marbre, le cuivre ou le laiton.

Veillez consulter les instructions d'utilisation du fabricant pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux.

## Composition

Solution d'imprégnation : 100g contient les agents actifs suivants : Peroxyde d'hydrogène (CAS 7722-84-1): 2.0g, Phenoxyethanol (CAS 122-99-6): 0.5g.

## Stockage

Stocker entre +5°C et +25°C. Durée de conservation après la première ouverture : 3 mois.

## Dispositif médical et biocides : à utiliser avec précaution

Veillez lire l'étiquette et les informations sur le produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

### LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

[www.anios.com](http://www.anios.com)



0459

### ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany

**ECOLAB**  
PROTECTING WHAT'S VITAL™

LABORATOIRES  
**ANIOS**  
An Ecolab Company